



# Masque

3 PLIS  
à usage unique

Norme EN 14683:2019+AC:2019




CE  
TYPE I




**Packaging entièrement en Français**



Confortable

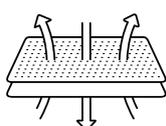

Respirable

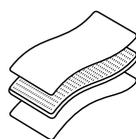

3 plis



**Filtre 95%**  
**des bactéries**

- Boîte de 10 masques
- Ref : PACK10MASQUE3PLIS

EAN : 3701088951358

**Vog Import** (Département Vog Protect)  
154 Boulevard MacDonald - 75019 PARIS  
[www.vogprotect.fr](http://www.vogprotect.fr)

# Manuel d'utilisation entièrement en Français

100 mm

145 mm

## Instructions

Date de préparation du manuel : 1er Avril 2020

Version du manuel : T1

Veillez lire les instructions avant utilisation

**Nom du produit : Masque médical jetable**

**Type et spécifications :** Elastiques d'oreilles, 17.5x9.5cm

**Type :** Type I

**Norme applicable : EN 14683:2019+AC:2019**

### Utilisation conforme :

Le masque médical est à usage unique, jetable, fourni non stérile. Il est destiné à être utilisé pour les patients et d'autres personnes afin de réduire le risque de propagation des infections, en particulier dans les situations d'épidémie ou de pandémie

### Structure et composition :

Ce masque est fabriqué à partir d'un masque vierge, d'une barrette d'ajustement et de deux élastiques de maintien. Le masque vierge est fait de 3 couches. Les couches internes et externes sont en tissu non tissé, la couche intermédiaire est en polypropylène fondu.

### Performances principales :

- 1) Efficacité de la filtration bactérienne :  $\geq 95\%$
- 2) Pression différentielle :  $< 40 \text{ Pa/cm}^2$
- 3) Propreté microbienne :  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

### Introduction à l'utilisation :

- 1) Ouvrez la boîte et retirez un masque.
- 2) Retirez le masque par les élastiques, veillez à ce que le côté coloré soit devant et la barrette de maintien en haut. Tirez les élastiques jusque derrière vos oreilles et moulez la barrette de maintien à la forme de votre nez. Tirez le bas du masque jusqu'à ce qu'il recouvre votre menton et vos joues.

### Précautions :

- 1) Vérifiez l'intégrité de la boîte avant d'utiliser les masques ainsi que l'état des masques et leur date de péremption.
- 2) Si vous êtes allergique au tissu non tissé, soyez prudent en utilisant ce produit.
- 3) Après utilisation du masque, jetez le conformément aux législations en vigueur sur le traitement des déchets dans votre localité.
- 4) Ce produit est jetable. Ne pas le réutiliser ou tenter de le nettoyer. Si vous le sentez inconfortable à l'utilisation, cessez de l'utiliser et remplacez-le par un nouveau.

### Stockage :

stockez le produit dans une pièce bien ventilée à l'abri de l'humidité, à l'abri des gaz corrosifs, à l'abri des températures élevées.

**Durée de conservation :** 2 ans

Meaning of package symbols:

Symbole	Explication		
	ne pas réutiliser		date de fabrication
	ne pas utiliser si la boîte est endommagée		utiliser avant le
	garder à l'abri de la lumière du soleil		n° de lot
	maintenir au sec		fabriquant
			représentant autorisé dans la communauté Européenne

**N° de lot :** référez-vous à la boîte

**Date de fabrication :** référez-vous à la boîte

**Date de validité :** référez-vous à la boîte